

**JEDE SEKUNDE ZÄHLT.
SCHAU HIER, WORAUF
ES ANKOMMT:**



Man kann mit dem AED Defibrillator nichts falsch machen.

Man kann einer Person mit dem AED Defibrillator keinen Schaden zufügen. Der AED Defibrillator führt nach dem Kleben der Elektroden selbstständig eine genaue Herzrhythmusanalyse durch. Ein Schock wird nur freigegeben, wenn er aus medizinischer Sicht unbedingt erforderlich ist.

Innerhalb von drei Minuten soll der Defi eingesetzt werden.

Liegt eine Herzrhythmusstörung wie Kammerflimmern vor, so sinkt die Überlebenschance der betroffenen Person in jeder Minute um ca. 10%. Um Leben zu retten, muss der AED innerhalb kürzester Zeit zum Einsatz kommen. Je eher desto besser.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

Kann ich den Defi selbst einsetzen?

Ja, im Notfall geht es um jede Sekunde. Prüfe, ob die betroffene Person bewusstlos ist und nicht atmet. Informiere, wenn möglich, andere Personen und rufe um Hilfe.

Woher weiß ich, was zu tun ist?

Der DEFi sagt Dir im Notfall genau, was Du tun musst. Durch gesprochene Anweisungen bekommst Du eine **Schritt-für-Schritt-Anleitung**. Sobald der Defi eingeschaltet wird, startet die Sprachansage. (Siehe „Wie funktioniert der neue Defi?“ im Innenteil.)

Kann ich mit dem Defi jemanden schädigen?

Nein, der Defi misst über die Klebeelektroden auf der Brust genau, ob ein Schock notwendig ist oder nicht. Nur wenn der Schock überlebenswichtig ist, gibt der Defi den Schock frei. Wenn kein Schock notwendig ist, kann kein Schock ausgelöst werden.

Kann ich nicht einfach auf den Rettungsdienst warten?


Nein, im Notfall ist es sehr wichtig, schnellstmöglich zu helfen (**ideal innerhalb von drei Minuten**). Rettungsdienste können häufig nicht rechtzeitig vor Ort eintreffen. Wichtig ist die schnelle Hilfe durch Menschen wie Dich, um dem Betroffenen das Leben zu retten.

AEDs/Defis mit
Schulung für
Unternehmen,
Vereine & Praxen.

www.defi-profi.de



Unser neuer Defi.

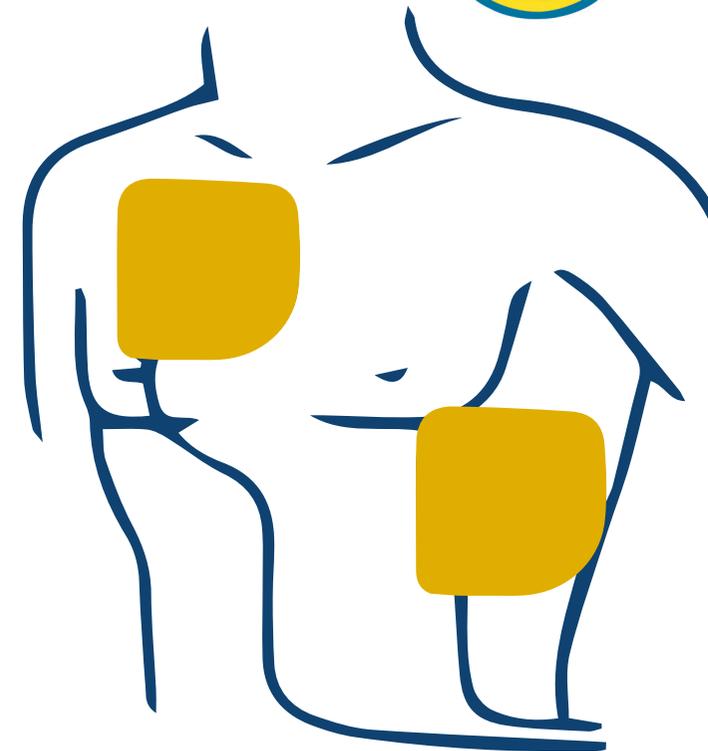

**WICHTIGE
Informationen zum
Defibrillator (AED).**



Erste Hilfe mit dem Defibrillator

Unser neuer Defi

Liebes Vereinsmitglied,

im Herznotfall kommt es auf schnelle Hilfe an – vor allem durch uns Mitglieder. Mit der Bereitstellung eines neuen AED Defibrillators (AED oder kurz Defi) ermöglichen wir allen Mitgliedern, eine von plötzlichem Herz-Kreislaufstillstand betroffene Person zu reanimieren.

Unser neuer Defi ist speziell für den Einsatz durch Laien entwickelt. Jeder kann unseren neuen Defi im Notfall bedienen. **Das Gerät ist sicher in der Anwendung – Du kannst damit nichts falsch machen!**

Unser neuer Defi führt Dich mit sehr klaren, gesprochenen Anweisungen durch die Reanimation und gibt Dir genaue Anleitung zur Herzdruckmassage. Ein Schock wird nur ausgelöst, wenn die automatische Analyse des Defis eindeutig feststellt, dass der Schock aus medizinischer Sicht unbedingt nötig ist.

In diesem Flyer haben wir für Dich wichtige Informationen zusammengetragen. Informiere Dich aufmerksam, damit Du im Notfall schnell handeln kannst.

Viele Grüße, Dein Vorstand



Melde Dich bei Fragen auch gern bei unserem Partner: www.defi-profi.de

Wie funktioniert der neue Defi?

POWERHEART G5

Rescue-Ready-Anzeige

täglicher automatischer Selbsttest

● = Gerät OK

✗ = Fehler, Service verständigen



Lautsprecher

Der Defi sagt genau, was zu tun ist. Durch gesprochene Anweisungen bekommst Du eine **Schritt-für-Schritt** Anleitung zur Ersten Hilfe mit dem AED Defibrillator.

KEINE Schocktaste

Der AED führt nach dem Kleben der Elektroden selbstständig eine genaue Herzrhythmusanalyse durch. Ein Schock wird nur freigegeben, wenn er aus medizinischer Sicht erforderlich ist. Der Schock wird vollautomatisch ausgelöst, niemand muss eine Taste drücken.



HLW Feedback-Sensor

Direkte Rückmeldung bei der Herzdruckmassage zu Drucktiefe, Geschwindigkeit und Entlastung.



Überblick im Notfall

Frühzeitiges Erkennen und Handeln



Wenn die Person nicht ansprechbar ist und Atmung/Puls nicht vorhanden ist...



NOTRUF wählen.

Herzdruckmassage* durchführen und schnellstmöglich den Defi holen (lassen).



DEN ANWEISUNGEN DES DEFIS FOLGEN. DU KANNST NICHTS FALSCH MACHEN.

***Mindestens:** einfaches Pressen, ca. 100 x pro Minute, 6 cm tief.
Noch besser: nach 30 x Pressen, 2 x Beatmen.
Wichtig: Nach jedem Pressen wieder vollständig entlasten, damit sich die Herzkammern erneut füllen können.

